

# Dosiertabelle


für FAVORIT Desinfektionskonzentrate

multi-com

HYGIENE · DENTAL · CARE

| Gebrauchsfertige Lösung |                     | 1.000 ml/1L | 2.000 ml/2L | 3.000 ml/3L | 4.000 ml/4L | 5.000 ml/5L | 8.000 ml/8L | 10.000 ml/10L |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 0,25%                   | Wasser              | 997,5 ml    | 1.995 ml    | 2.992,5 ml  | 3.990 ml    | 4.987,5 ml  | 7.980 ml    | 9.975 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 2,5 ml      | 5 ml        | 7,5 ml      | 10 ml       | 12,5 ml     | 20 ml       | 25 ml         |
| 0,5%                    | Wasser              | 995 ml      | 1.990 ml    | 2.985 ml    | 3.980 ml    | 4.975 ml    | 7.960 ml    | 9.950 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 5 ml        | 10 ml       | 15 ml       | 20 ml       | 25 ml       | 40 ml       | 50 ml         |
| 1,0%                    | Wasser              | 990 ml      | 1.980 ml    | 2.970 ml    | 3.960 ml    | 4.950 ml    | 7.920 ml    | 9.900 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 10 ml       | 20 ml       | 30 ml       | 40 ml       | 50 ml       | 80 ml       | 100 ml        |
| 2,0%                    | Wasser              | 980 ml      | 1.960 ml    | 2.940 ml    | 3.920 ml    | 4.900 ml    | 7.840 ml    | 9.800 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 20 ml       | 40 ml       | 60 ml       | 80 ml       | 100 ml      | 160 ml      | 200 ml        |
| 2,5%                    | Wasser              | 975 ml      | 1.950 ml    | 2.925 ml    | 3.900 ml    | 4.875 ml    | 7.800 ml    | 9.750 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 25 ml       | 50 ml       | 75 ml       | 100 ml      | 125 ml      | 200 ml      | 250 ml        |
| 3,0%                    | Wasser              | 970 ml      | 1.940 ml    | 2.910 ml    | 3.880 ml    | 4.850 ml    | 7.760 ml    | 9.700 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 30 ml       | 60 ml       | 90 ml       | 120 ml      | 150 ml      | 240 ml      | 300 ml        |
| 4,0%                    | Wasser              | 960 ml      | 1.920 ml    | 2.880 ml    | 3.840 ml    | 4.800 ml    | 7.680 ml    | 9.600 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 40 ml       | 80 ml       | 120 ml      | 160 ml      | 200 ml      | 320 ml      | 400 ml        |
| 5,0%                    | Wasser              | 950 ml      | 1.900 ml    | 2.850 ml    | 3.800 ml    | 4.750 ml    | 7.600 ml    | 9.500 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 50 ml       | 100 ml      | 150 ml      | 200 ml      | 250 ml      | 400 ml      | 500 ml        |
| 10,0%                   | Wasser              | 900 ml      | 1.800 ml    | 2.700 ml    | 3.600 ml    | 4.500 ml    | 7.200 ml    | 9.000 ml      |
|                         | Desinfektionslösung | 100 ml      | 200 ml      | 300 ml      | 400 ml      | 500 ml      | 800 ml      | 1.000 ml      |

**Hinweis:**  
 Füllen Sie zuerst das Wasser (etwa Raumtemperatur) ein und geben Sie anschließend das FAVORIT Desinfektionsmittel hinzu.

 Weitere Informationen in den Produktinformationen. Download auf [multi-com.de](http://multi-com.de) und [multi-com.at](http://multi-com.at)

REF 19388 DES-02-18051 2021-12

multi-com GmbH & Co. KG  
 Deutschland (Hauptsitz)  
 Hagener Allee 3 | 22926 Ahrensburg

Österreich (Vertriebsbüro)  
 Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1 | 1030 Wien



[service@multi-com.de](mailto:service@multi-com.de)



[multi-com.de](http://multi-com.de)



+49 (0) 4102 / 80 79 59